

## ETÜV BAKIM VE KULLANMA TALİMATI

### 1.0 CİHAZIN KULLANILDIĞI YERLER:

- ✓ Aile planlaması

### 2.0 SORUMLULAR

- ✓ Aile Sağlığı Elemanları

### 3.0 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- ✓ Cihaz steril edilecek malzemenin şekil ve yapısının bozulmayacağı set sıcaklıklarında çalıştırılmalıdır.
- ✓ Isıtılan malzemelerin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir veya patlayabilir olmadığı özellikle kontrol edilir.
- ✓ Sıvı hale dönüşebilecek ve hacimce genişleyebilecek numuneler kapalı kapta ısıtılmamalıdır.

### 4.0 KULLANIMI

- ✓ Cihazın ön tarafında bulunan Aç-Kapa anahtarı ile cihaza güç verilir
- ✓ Kontrol sisteminin çalışır duruma geldiği izlenir.
- ✓ 170 Derecede bir saat; toplam işlem süresi (araçların sterilizatöre yerleştirilmesi, 170 Dereceye ısıtma, bir saat ısıda tutma ve soğutma ) 2-2,5 saat arasındadır.

### 5.0 BAKIMI

- ✓ Cihazın periyodik bakımı yoktur.

### 6.0 TEMİZLİK

- ✓ Cihaz temizliği ortam sıcaklığında ve cihaz güç kablosu cihazdan ayrıldıktan sonra yapılır.
- ✓ Kir ve tozlara karşı cihaz ıslak bez ile silinir. Sıvı deterjan kullanılabilir.
- ✓ Hariçden gelebilecek pas lekelerinden cihaz korunur. En küçük pas lekesi dahi olsa büyümeden derhal temizlenir.